



ÁLLÍTHATÓ UJJBEGYSZÚRÓ KÉSZÜLÉK LÁNDZSAKIVETŐVEL


Használati útmutató

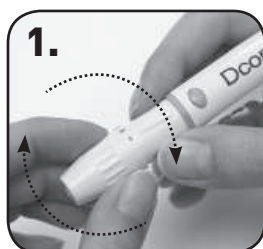

1. Szappannal és meleg vízzel mossa meg, majd alaposan szárítsa meg kezeit. Vegye le az ujjbegyszűrő kupakját.

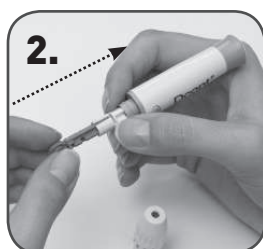


2. Helyezzen új lándzsát a lándzsatartóba, ügyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen. A lándzsakivetőt húzza alaphelyzetbe (hátra).

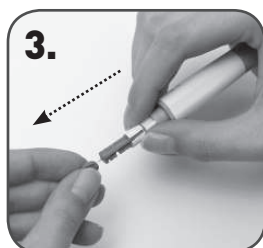

3. Vegye le a védősapkát a lándzsáról. Ne dobja ki ezt a sapkát.



4. Helyezze vissza a kupakot az ujjbegyszűrőre.

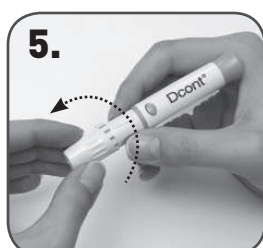

5. Válassza ki a kívánt szúrás mélységet úgy, hogy megfelelő vérmintát nyerjen a lehető legkevesebb kellemetlenség mellett. A mélységet az ujjbegyszűrő kupakjának forgatásával állíthatja be.



6. Beállítás

■ ■ ■ ■ ■ érzékeny bőr esetén

■ ■ ■ ■ ■ normál bőr esetén

■ ■ ■ ■ ■ kérges bőr esetén




7. Vegye egyik kezébe az ujjbegyszűrőt. A másik kezével húzza ki a csúsztatható szárat, amíg egy kattantást nem hall. Az ujjbegyszűrő ezzel betöltötte a lándzsát, és használatra kész.



8. Nagyobb vérminta vételéhez eressze le a kezét, amelyből mintát kíván venni, majd néhányszor rázza meg. Dörzsölje a másik kezével a tenyértől az ujjak felé. Illessze az ujjbegyszűrő végét ahhoz az ujjához, amelyből vérmintát kíván venni. A bőr megszurásához nyomja meg az elsütő gombot. Tegye félre az ujjbegyszűrőt, és végezze el a vércukorvizsgálatot a vércukormérőre vonatkozó utasítások szerint.



9. Ha végzett, vegye le az állítható ujjbegyszűrő kupakot. Helyezze vissza a sapkát a lándzsa szabadon álló tujjére.

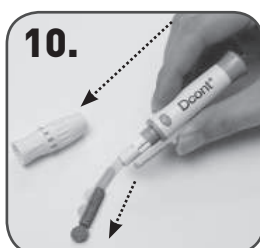

10. Tartsa el magától az ujjbegyszűrő kupakot, majd csúsztassa előrefelé a lándzsakivető kart, a lándzsát pedig megfelelő tárolóban helyezze el. Állítsa vissza a lándzsakivető kart az eredeti helyzetébe, majd nyomja be az elsütő gombot. Tegye vissza az állítható ujjbegyszűrő kupakot.

Az ujjbegyszűrő és a kupak tisztítása

Az eszközöket vízzel és kímélő tisztítószerrel megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg! Ne merítse az ujjbegyszűrőt semmilyen folyadékba. Az eszközök fertőtlenítéséhez készítsen oldatot egy rész háztartási fertőtlenítőszerből és tíz rész vízből. Törölje át az ujjbegyszűrőt az ezzel az oldattal megnedvesített puha ruhával. Áztassa csak a kupakot ebben az oldatban 30 percig. Fertőtlenítés után öblítse át vízzel, és hagyja megszáradni a levegőn.

Ez az ujjbegyszűrő készülék egy személy számára otthoni használatra készült. Még közeli barátaival és családtagjaival se használja közösen.

ÁLLÍTHATÓ UJJBEGYSZÚRÓ KÉSZÜLÉK LÁNDZSAKIVETŐVEL

Használati útmutató



A 77 Elektronika Kft. számára rendkívül fontos, hogy kényelmes, biztonságos és minimális fájdalmat okozó ujjbegyszűrő készülékeket kínáljon, amelyekkel a hajszálerekből vehető a vérminta vércukorszint ellenőrzése céljából. Az innovatív kialakításnak köszönhetően a szűrési mélység hat fokozattal állítható be a bőrvastagságnak megfelelően. Az állítható kényelmi csúcson a hosszabb beosztások nagyobb mintavételi mélységet jeleznek. Az ujjbegyszűrő lehetővé teszi a megfelelő mélység kiválasztását, ezzel csökkenti a tűszúrás okozta kellemetlenséget, ugyanakkor kellő mennyiségű vérmintát vesz. A legjobb eredmény érdekében mindig alaposan mosson kezet a vérvétel előtt.



VIGYÁZAT: CSAK EGY PÁCIENS HASZNÁLHATJA. A készüléket tilos használni egészségügyi szak személyzetnek vérvételre a tartós ápolás terén, életvitelt segítő létesítményekben, kórházakban vagy egészségügyi szakkiállításokon. A készülék még családtagokkal sem használható közösen.

A fertőzés esélyének csökkentése érdekében:

Mintavétel előtt szappannal és vízzel tisztítsa meg a szúrás helyét.

Mindig tartsa tisztán az ujjbegyszűrő készüléket.

Mindig új, steril lándzsát használjon. A lándzsák egyszer használatosak.



Ujjbegyszűrő és lándzsa gyártó:
SteriLance Medical (Suzhou) Inc.
NO.68 LiTangHe Rd, XiangCheng, Suzhou, China



Forgalmazó:
77 Elektronika Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 98.
Tel.: 06 1 206 1480, Fax: 06 1 206 1481
E-mail: ugyfelszolgalat@e77.hu
www.dcont.hu www.e77.hu



EMERGO EUROPE
MOLENSTRAAT 15, 2513 BH HÁGA, HOLLANDIA



0197 Ujjszűrő lándzsa